

# Instrucciones para universal smartphone adapter HEINE DELTAone y DELTA 30.

Documentación dermatoscópica digital con la cámara del smartphone.

## ¡ASÍ ES MUY SENCILLO!




Con el adaptador universal HEINE para smartphone puede usar de forma flexible prácticamente cualquier smartphone, independientemente del sistema operativo (Android, Windows, etc.).

Para muchos modelos de iPhone\*, HEINE tiene en su gama fundas de móvil a medida con adaptador integrado. Más información en [www.heine.com](http://www.heine.com)



Por tanto, necesita un DELTA 30 o DELTAone, un smartphone y el adaptador adecuado (para DELTA 30 o DELTAone).

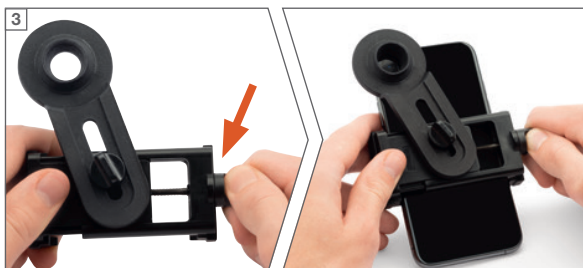

Gire el tornillo de muletilla para ajustar el soporte del adaptador a la anchura de su smartphone. Coloque el soporte aproximadamente en el centro del lado trasero de su smartphone y fíjelo utilizando el propio tornillo de muletilla.



A continuación, coloque en su posición el adaptador delante de la cámara del smartphone: Para ello, suelte el tornillo de muletilla del adaptador hasta que pueda girarse lateralmente sin esfuerzo y desplazarse tanto hacia adelante como hacia atrás.

Si su smartphone solo tiene una cámara, fije el adaptador apretando el tornillo de muletilla por el centro delante de dicha cámara.

Si su smartphone tiene varias cámaras, primero debe comprobar cuál de ellas es la cámara principal: coloque el adaptador de forma que una de las lentes de la cámara de su smartphone se encuentre en el centro. ¿Está claro el campo de visión en la pantalla en la vista de la cámara? Si todo es correcto, fije el adaptador delante de esa cámara.

¡Ya casi está listo!



El imán del adaptador sujeta ahora el smartphone sobre el anillo de enfoque del dermatoscopio.

Entonces ya puede hacer fotos como de costumbre con la función de cámara de su smartphone.

¿Está buscando una solución para la documentación digital? Encontrará información al respecto en: [www.heine.com/es/digital-documentation-derm](http://www.heine.com/es/digital-documentation-derm)

\*Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas de la empresa Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. Reservado el derecho a modificación sin previo aviso. © 2022 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Todos los derechos reservados.

