

HEINE DELTA 30

Dermatoskop

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE



HEINE DELTA 30 Dermatoskop

● ● ●
Ladezustand
60 - 100 %

● ● ●
Ladezustand
33 - 66 %

● ● ●
Ladezustand
10 - 33 %

● ● * blinkt
Ladezustand
< 10 %



Für einen sicheren Halt rastet die Kontaktscheibe mit einem deutlich hörbaren Klick ein.



Diode leuchtet
blau = polarisierte
Beleuchtung

Diode leuchtet
nicht = nicht
polarisierte
Beleuchtung

EIN FILM SAGT MEHR ALS 1.000 WORTE



Der Film „Anwendung“ zeigt das DELTA 30 in Aktion am Patienten.



Erinnern Sie sich an jedes Muttermal.

Der HEINE DERManager* ist die ideale Ergänzung zu Ihrem DELTA 30. Diese Softwarelösung macht die digitale Verwaltung von Hautaufnahmen zum Kinderspiel.

*Verfügbar in Deutschland. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in weiteren Ländern auf unserer Webseite.

