

Dermatoscope HEINE DELTA 30

L'ESSENTIEL EN BREF

Appuyer sur le bouton pour passer du mode d'éclairage polarisé au mode non polarisé et inversement = fonction « Toggle ».
Plus d'informations sur heine.com/fr/Toggle

Champ de vision de 30mm Ø véritables

3 niveaux de luminosité

marche|arrêt

Chargement avec câble micro USB ou charger 30 chargeur de table



Dermatoscope HEINE DELTA 30

● ● ●
État de charge
60 - 100%

● ● ●
État de charge
33 - 66%

● ● ●
État de charge
10 - 33%

● ● ● ✨ clignote
État de charge
< 10%



Pour un maintien ferme, l'embout de contact s'enclenche avec un clic clairement audible.



Diode brille en
bleu = éclairage
polarisé

Diode est
éteinte = éclairage
non polarisé

UN FILM EN DIT PLUS LONG QUE 1000 MOTS



Le film « **Utilisation** » montre le DELTA 30 en action sur un patient.



Souvenez-vous de chaque grain de beauté.

Le HEINE DERManager* est le complément idéal de votre DELTA 30. Cette solution logicielle simplifie la gestion numérique des données d'images dermatoscopiques.

*Vérifiez sur notre site web dans quels pays le DERManager est actuellement disponible.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Email: info@heine.com, www.heine.com
Sous réserve de modifications techniques. 09|24 V-300.00.032 FR

