

Dermoscopio HEINE DELTAone

LO MÁS DESTACADO, EN RESUMEN

Campo de visión
21 mm Ø reales

3 niveles
de luminosidad

Con solo pulsar
un botón se
puede alternar
entre luz polarizada
y no polarizada =
función «Toggle».
Más información en
heine.com/es/Toggle

on | off



Dermatoscopio HEINE DELTAone

Para una retención segura, el disco de contacto encaja en su lugar con un clic claramente audible.

El diodo está iluminado en azul = iluminación polarizada

El diodo está apagado = iluminación no polarizada

Recarga con cable micro USB

● Estado de carga > 25 %

● Estado de carga < 25 %

✱ intermitente Estado de carga < 10 %

UN VÍDEO VALE MÁS QUE 1000 PALABRAS



El vídeo «**Application**» muestra el DELTAone en acción en el paciente.



Recuerde todos y cada uno de los lunares.
El HEINE DERManager* es el complemento ideal para su DELTAone. Esta solución de software simplifica la gestión digital de los datos de las imágenes dermatoscópicas.

*Consulte en nuestra página web en qué países está disponible actualmente el DERManager.

