

Dermoscopio HEINE DELTAone

DATI PRINCIPALI

Campo visivo effettivo
di 21 mm Ø

Passaggio dalla
luce polarizzata
a quella non
polarizzata con
la pressione di un
tasto = funzione
"Toggle". Maggiori
informazioni
alla pagina
heine.com/it/Toggle

3 livelli di luminosità

on | off



Dermatoscopio HEINE DELTAone

Per un aggancio sicuro, la piastrina di contatto scatta in posizione con un clic chiaramente udibile.

Diodo illuminato di blu = illuminazione polarizzata

Diodo spento = illuminazione non polarizzata

Ricarica con cavo micro USB

● Stato di carica >25 %

● Stato di carica <25 %

* lampeggiante
Stato di carica <10 %

UN FILM VALE PIÙ DI 1.000 PAROLE



Il film "Application" mostra il DELTAone in azione sul paziente.



Ricorda ogni singolo neo.

HEINE DERManager* è il complemento ideale per il vostro DELTAone. Questa soluzione software semplifica la gestione digitale dei dati delle immagini dermatoscopiche.

*Verifica sul nostro sito web in quali paesi è attualmente disponibile il DERManager.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Email: info@heine.com, www.heine.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 09|24 V-300.00.038 IT

