

Reconditionnement hygiénique

Skiascopes HEINE BETA® 200 avec ParaStop®

Informations générales en matière d'avertissement et de sécurité



AVERTISSEMENT ! Ce symbole attire l'attention sur une situation potentiellement dangereuse. Toute non-observation peut entraîner des blessures moyennes à graves.



REMARQUE ! Ce symbole est utilisé pour des informations. Il est important mais ne renvoie pas à un danger.

	Les instructions relatives au reconditionnement hygiénique doivent être respectées sur la base des normes, lois et directives nationales. Les mesures de reconditionnement décrites ne remplacent pas les règles spécifiques en vigueur de votre institution/département.
	En cas de soupçons de contamination, procéder à un traitement hygiénique.
	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG n'approuve que les agents et procédures répertoriés dans ces instructions.
	Le reconditionnement hygiénique doit être effectué par des personnes possédant d'expertise hygiénique adéquate.
	Veuillez tenir compte des instructions du fabricant relatives au fluide de reconditionnement appliqué.
	Éviter la pénétration de liquides dans le dispositif
Limitations en matière de reconditionnement	Contrôler à intervalles réguliers l'intégrité de l'appareil.



Désinfection par essuyage

1. Préparation

Désactiver le dispositif et le laisser refroidir.

2. Nettoyage et désinfection manuelle



Veiller à ce que toutes les surfaces soient entièrement humectées pendant le temps d'exposition complet spécifié par le fabricant du désinfectant. Si nécessaire, augmenter le nombre de procédures d'essuyage et ou le nombre d'essuyages.

Équipement

- Détergent, si nécessaire: enzymatique (p. ex. neodisher MediClean)
- Produit de désinfection :
alcoolique (p. ex. Incides N)
ou
alcoolique + d'ammonium quaternaire (p. ex. Super Sani-Cloth)
- Si vous utilisez des agents de reconditionnement autres que ceux recommandés, assurez-vous qu'ils ne soient pas moussants.

Mise en œuvre

- Pour les saletés plus importantes, vous pouvez d'abord procéder au nettoyage avec un chiffon imbibé d'agent nettoyant avant de désinfecter avec une lingette désinfectante.
- Nettoyer et désinfecter le dispositif manuellement.
- Faites attention plus particulièrement aux zones difficiles d'accès.
- Essuyer bien les surfaces que vous touchez : par ex. les éléments de fonctionnement, les commandes rotatives et les éléments de verrouillage.
- Pour éliminer le désinfectant et procéder ensuite au séchage, suivre les instructions fournies par le fabricant du désinfectant.

3. Inspection et test de fonctionnement



- Inspecter l'appareil à la recherche de contaminants ou d'abrasions visibles. Procéder à un nouveau reconditionnement si nécessaire. Jeter s'il est impossible d'éliminer les contaminants.

4. Stockage

La stocker de sorte à la protéger contre toute recontamination, de la poussière et de l'humidité.

