

Reprocesamiento higiénico

HEINE Charging Case CC1 y Wall Charger CW1

Advertencia general e información de seguridad



¡ADVERTENCIA! Este símbolo advierte de una posible situación peligrosa. La no observancia de las indicaciones puede causar lesiones leves y medias.



¡NOTA! Este símbolo se emplea para la información, siempre que no puedan entrañar peligro.

	Se deben respetar las instrucciones sobre el reprocesamiento higiénico, en base a las normativas, leyes y directrices nacionales. Las medidas de reprocesamiento descritas no sustituyen las reglas específicas aplicables para su institución/departamento.
	Efectúe una depuración higiénica si cree que el aparato ha podido resultar contaminado. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG solo aprueba los agentes y procedimientos mencionados en estas instrucciones. El reprocesamiento higiénico deben llevarlo a cabo personas con la adecuada experiencia en higiene. Siga las indicaciones del fabricante del agente limpiador. Evite que entre líquido en el dispositivo. Antes de llevar a cabo el reprocesamiento, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.
	Colocar en el cargador solo dispositivos acondicionados. Antes de usarlo de nuevo, asegúrese de que el aparato esté completamente seco después de la limpieza.
Limitaciones del reprocesamiento	Compruebe periódicamente la integridad del dispositivo.



Desinfección con una toallita

1. Limpieza y desinfección manual



- Asegúrese de que todas las superficies contaminadas estén lo suficientemente húmedas durante todo el tiempo de exposición indicado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario, aumentar el número de procedimientos de limpieza con una toallita y/o el número de pasadas.

Equipo

- Toallitas desinfectantes:
alcohólico (p. ej. Incides N o mikrozid universal wipes) o
alcohólico + aminos cuaternario (p. ej. Super Sani-Cloth)
- Si utiliza agentes de reprocesamiento diferentes de los recomendados, asegúrese de que no hagan espuma.

Modo de empleo

- Limpie y desinfecte las superficies contaminadas a mano con un paño.
- Hay que prestar especial atención a las zonas de difícil acceso.
- Para eliminar el desinfectante y secar después, hay que seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante del desinfectante.
- Limpie el cable y el adaptador de corriente solo cuando sea necesario y únicamente con un paño seco.

2. Inspección y comprobación del funcionamiento



- Comprobar el correcto funcionamiento del aparato antes de su uso. No utilizar, si se detectan daños.

