

Ritrattamento igienico

HEINE mini-c, HEINE mini-e,

HEINE mini 3000® Cliplamp,

HEINE mini 3000® Combi Lamp

Avvertenza generale e informazioni sulla sicurezza



AVVERTENZA! Questa segnalazione indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto di questa avvertenza può portare a lesioni di piccola o media portata.



NOTA! Questo simbolo indica informazioni utili che sono importanti ma non associate a pericoli.

	Attenersi alle istruzioni per il ritrattamento igienico secondo gli standard nazionali, le leggi e le linee guida. Le misure di ritrattamento descritte non sostituiscono le regole specifiche applicabili presso la vostra istituzione / il vostro dipartimento.
	Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG approva unicamente gli agenti e le procedure elencati nelle presenti istruzioni. Il ritrattamento igienico deve essere eseguito da persone con competenza igienica adeguata. Attenersi alle istruzioni dei produttori delle sostanze di preparazione. Evitare che penetrino liquidi nel dispositivo. Il dispositivo non è sterilizzabile. Abbassalingua in plastica HEINE monousosono sono destinati solo al monouso. In caso di riutilizzo sussiste il pericolo di danneggiamento del dispositivo e rischio di infezione.
Limiti del ritrattamento	Verificare periodicamente che il dispositivo sia integro.



Disinfezione per strofinamento

1. Preparazione

Rimuovere la spatola per la cavità orale (se presente) e smaltirla.
Spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare.

2. Pulizia manuale e disinfezione



Prestare attenzione ad umettare completamente tutte le superfici contaminate per tutto il tempo di applicazione indicato dal produttore della soluzione disinfettante. Aumentare eventualmente il numero di procedure di strofinamento e/o il numero di passaggi.

Attrezzatura

- Disinfettante:
alcolico (ad es. Incides N o mikroqid universal wipes) o
alcolico + a base di sali d'ammonio quaternario (ad es. Super Sani-Cloth)
- In caso di utilizzo di materiali di trattamento diversi da quelli raccomandati, accertarsi che questi non formino schiuma.

Implementazione

- Pulire e disinfettare il dispositivo manualmente.
- Prestare particolare attenzione alle aree di difficile.
- Strofinare con cura le aree con cui si entra in contatto.
- Per rimuovere il disinfettante e quindi asciugare, seguire le istruzioni fornite dal produttore del disinfettante.

3. Ispezione e test di funzionamento



- Verificare la presenza di eventuali impurità o contaminanti visibili sul l'apparecchio. Eventualmente igienizzare nuovamente.
- Non utilizzate l'apparecchio se rilevate danneggiamenti.

4. Conservazione

Conservare in modo da proteggere da ricontaminazione, polvere e umidità.

